



# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**  
**Слуховой аппарат Ахон V-185**



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства .....	3
2. Внешний вид.....	3
3. Работа с устройством .....	3
4. Технические характеристики .....	4
5. Уход за слуховым аппаратом.....	4
6. Примечание .....	4


## 1. Описание устройства

Благодарим вас за покупку нашего слухового аппарата.

Если вам трудно хорошо слышать окружающих, слуховой аппарат поможет вам восстановить слух, чтобы вы могли жить привычной жизнью.

Ношение слухового аппарата поможет Вам заново открыть для себя удовольствие от общения с друзьями и семьей, чувствовать себя более уверенно на работе и наслаждаться фильмами, музыкой и ТВ-шоу.

## 2. Внешний вид

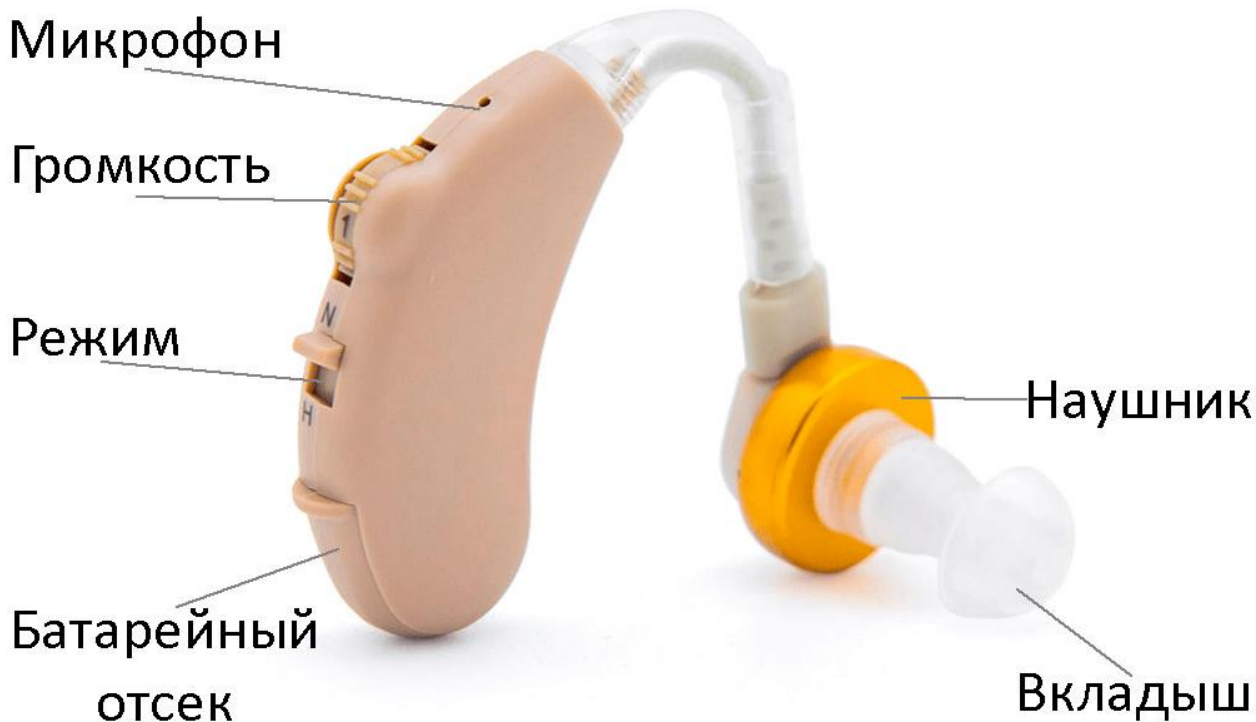

## 3. Работа с устройством

- 1) Откройте батарейный отсек и вставьте батарею, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек. Слуховой аппарат начнёт работать. Он отключается, когда отсек открывают.
- 2) Наденьте вкладыш на наушник.
- 3) Поставьте уровень громкости на 1, чтобы громкий шум не причинил вам неудобств.
- 4) Наденьте слуховой аппарат за ухо, плотно вставьте вкладыш в ухо. Вкладыш подбирайте чуть большего размера, чем ваше ухо. Он должен плотно прилегать к уху – это поможет избежать появления

шумов. Если вы слышите свист, значит, вкладыш слухового аппарата не подходит вам по размеру.

- 5) Поставьте переключатель режимов в положение Вкл (N) и постепенно настройте громкость, чтобы ясно слышать окружающие звуки. В шумном месте вы можете переключить режим на (H), чтобы включить программу шумоподавление.

#### 4. Технические характеристики

Вывод звука	130±5 дБ
Усиление звука	≥ 50 дБ
Искажение звуковой волны	≤ 5%
Диапазон частот	300 Гц – 4000 Гц
Входящий шум	≤30 дБ
Напряжение	1,5 В
Сила тока	≤4 мА

#### 5. Уход за слуховым аппаратом

Если нет звука от слухового аппарата возможно, это вызвано двумя причинами:

- 1) Аппарат выключен;
- 2) Батарея вставлена неправильно;
- 3) Батарея села;
- 4) Наушник повреждён;
- 5) Повреждён провод

Если звук стал очень слабым или нечётким, возможно, это вызвано двумя причинами:

- 1) Батареи почти села;
- 2) Наушник неисправен.

Используйте чистую сухую ткань и специальное моющее средство для чистки аппарата.

#### 6. Примечание

- 1) Пожалуйста, не используйте слуховой аппарат на большой громкости в течение длительного времени, это может повредить ваш слух.

- 2) Следите за состоянием изделия постоянно, чтобы избежать блокировки наушника или микрофона посторонними предметами. Поддерживайте вкладыш в ухо в чистоте.
- 3) Не подвергайте слуховой аппарат и его батарею воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры и воды. Не используйте в душе, под дождём, во время купания.
- 4) Не роняйте аппарат на пол.
- 5) Если в течение долгого времени не планируете пользоваться слуховым аппаратом, вытащите батарею из устройства.
- 6) Не разбирайте самостоятельно слуховой аппарат. В случае возникновения неполадок, обратитесь в сервисный центр.
- 7) Не утилизируйте батарею слухового аппарата с бытовыми отходами.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**